



TÕHUSAD LOODUSLIKUD TOOTED KOGU PERELE

100% NATURAALNE MEREVESI



Igapäevane ninahügieen, haigusseisundite ennetamine ja sümptomaatiline leevendus nagu allergilised reaktsioonid, külmetussümptomid, kõrva-nina-kurguhaigused, põskkoopapõletik, nina kinnisus.



EI SISALDA STEROIDE | RAVIMEID | SÄILITUSAINET

Tegemist on meditsiiniseadmega, enne kasutamist lugege kasutusjuhendit. Vajadusel pidage nõu arsti või apteekriga.

NINAHÜGIEEN – (isotooniline)

Ninasprei igapäevaseks ninahügieeniks



- Puhastab ja eemaldab mustuse (tolm, lima, allergeenid...)
- Aitab parandada hingamist ja seeläbi une kvaliteeti
- Aitab ennetada kõrva-, nina- ja kurguhaigusi
- Nina limaskesta kaitsevõime tugevdamine
- Niisutab nina limaskesta (Kuiv õhk kütteperioodil, konditsioneeris kasutamisel)
- Aitab ennetada külmetushaigusi**
- Võib kasutada pärast ninaoperatsiooni
- Kasutage alates 3. eluaastast



HEINAPALAVIK JA ALLERGIA LEEVENdamine – (isotooniline)

Ninasprei allergilise nina jaoks



- Kõrvaldab allergeenid**
- Ennetab allergia sümptomeid (aevastamine, nohu ja sügelus)
- Ägedate allergiate arvu vähenemine 42%. riniidi episoodid***
- Aitab niisutada ja taastada loomulikku niiskust nina limaskestas
- Rikastatud mangaaniga
- Kasutage alates 3. eluaastast

3+



NINAHÜGIEEN BEEBI (isotooniline)

Ninasprei beebi igapäevaseks ninahügieeniks



- Aitab õrnalt puhastada väikesed ninad
- Aitab välja pesta mustust (tolm, lemmikloomade karvad, allergeenid ja lima) ning soodustab loomulikku hingamist**
- Niisutab ja taastab nina limaskesta loomuliku niiskuse
- Aitab vähendada kõrva-, nina- ja kurguhaiguste riski**
- Parandab hingamist, et hõlpsustada head und ning pudelist või rinnaga toitmist
- Uus patenteeritud turvaotsik
- Imikutele ja lastele vanuses 0 – 3 eluaastat



NINAHÜGIEEN VASESOOLADEGA (isotooniline)

Ninasprei külmetuse vastu



- Põletikuvastaste ja antimikroobsete omadustega
- Pakub täiendavat kaitset külmetuse vastu
- Rikastatud vasesooladega
- Aitab vähendada kõrva-ninakurguhaiguste, nagu sinusiit, bronhiit ja kõrvapõletiku riski
- Peseb ninast välja mustuse, sealhulgas külmetushaigusi põhjustava õhusaaste, aidates piirata külmetussümptomite teket
- Sobib rasedatele ja kogu perele alates 3. eluaastast

3+



KINNINE NINA (hüpertooniline)

Ninasprei kinnise nina jaoks



- Aitab kiiresti eemaldada ninakinnisust, nohu ja sinusiiti**
- Aitab välja uhuda ka paksu lima
- Aitab leevendada külmetushaigusi, põskkoopapõletiku sümptomeid ja piirab sekundaarse infektsiooni riski**
- Vase- ja mangaanisooladega
- Kliiniliselt tõestatud. Teeb nina lahti vähem kui 1 minutiga*
- EI SISALDA steroide, ravimeid ega säilitusaineid; võib kasutada koos teiste ninaravimitega limaskestas niisutamiseks
- Kasutage alates 3. eluaastast

3+



KINNINE NINA LAPSED (hüpertooniline)

Ninasprei kinnise nina jaoks lastele



- Rikastatud vase- ja mangaanisooladega
- Õrn, kuid tõhus leevendus ummistunud ninale
- Eemaldab isegi paksu lima
- Pakub loomulikku leevendust ninakinnisusele (külmetushaigused, rinofarüngiit, allergiline riniit, sinusiit)
- Aitab kaasa bakterite kasvu vähendamisele
- Aitab võidelda külmetusega ja piirata sekundaarse infektsiooni riski
- Soovitav imikutele alates 3 kuust ja väikelastele



Kasutusjuhend

Lapsed ja täiskasvanud

1. Esmakordsel kasutamisel pihustage spreid esmalt õhku.
 2. Nina limaskesta puhastamiseks ja niisutamiseks: Hoidke pea püsti, asetage otsik ninasõõrmesse. Pihustage 1 või 2 korda kumbagi ninasõõrmesse. Laske üleliigne lahus ninast välja voolata ja seejärel nuusake nina.
 3. Ninaõõnsuste sügavamaks puhastamiseks: Kallutage pea ühele küljele, asetage otsik ülespoole jäävasse ninasõõrmesse. Pihustage pikaajaliselt. Laske üleliigne lahus teisest ninasõõrmest välja voolata ja seejärel nuusake nina.
- Kasutage 2 kuni 6 korda ööpäevas. Pärast iga kasutamiskorda puhastage otsik korralikult kuuma veega ja pühkige puhta, kuiva lapiga.



Imikud ja väikesed lapsed

- Esmakordsel kasutamisel pihustage spreid esmalt õhku.
- Nina limaskesta puhastamiseks ja niisutamiseks: Asetage otsik ettevaatlikult ninasõõrmesse. Pihustage lühidalt 1 kuni 2 korda mõlemasse ninasõõrmesse. Enne nina pühkimist laske üleliigne vedelik välja voolata.
- Ninaõõnsuste sügavamaks puhastamiseks: Asetage alla 2-aastane laps selili, lapsed üle 2 eluaasta võivad istuda. Kallutage lapse pea küljele (mitte kunagi tahapoole) ja asetage otsik õrnalt ülemisse ninasõõrmesse. Pihustage üks pihustus hoides pihustit all ligikaudu 2 sekundi jooksul. Laske üleliigne lahendus teisest ninasõõrmest välja voolata ja pühkige nina. Vajadusel korrake protseduuri teise ninasõõrmega;
- Kasutage 2 kuni 6 korda ööpäevas. Pärast iga kasutamiskorda puhastage otsik seebiveega ja kuivatage.



*GPRX andmed: naatriumkloriidi alamkategooria: andmed 2016. aasta aprillist 2018. aasta aprillini – Ühendkuningriigi katvus.

**Ninaaukude väljapesemisega.

*** Uuring 60 täiskasvanuga, kus 30 kasutasid Stérimari iga päev 5 inimese jooksul kuud standardravi kõrval (M. Grasso et al., 2018).

